



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Массажер для глаз EyeCare**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Области применения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Схемы использования .....</b>	<b>4</b>
2.1 Профилактика близорукости, для более красивых глаз.....	4
2.2 Стереть следы усталости .....	4
2.3 Уменьшить морщины, увеличить эластичность кожи .....	4
<b>3. Использование.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Неодимовые магниты .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Меры предосторожности .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Внешний вид устройства .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Уход и обслуживание .....</b>	<b>7</b>
<b>8. Устранение неисправностей.....</b>	<b>7</b>

## 1. Области применения

Данный 22-точечный массажер разработан таким образом, чтобы совпадать с контуром лица. Насадки изготовлены из силикона высокой степени очистки, который не дает каких-либо побочных реакций на коже. Магниты на насадках производят дополнительный эффект от магнитной терапии. Кроме того, устройство имеет небольшой моторчик, управляемый интегральной микросхемой, для создания различного эффекта от массажа на разной скорости.

В автоматическом режиме использования типы массажа будут меняться каждые 15 секунд.

1. Сильная вибрация.
2. Вибрация среднего уровня не такая сильная, как первая.
3. Слабая вибрация.
4. Нежный режим: вибрация будет меняться волнами через 1,5 секунды (попеременно будут использоваться сильная и слабая вибрация).
5. Комфортный режим: вибрация будет меняться волнами через 1 секунды (попеременно будут использоваться сильная и слабая вибрация).
6. Сильный ритм: будет пульсирующий массаж каждые 0,5 секунды.
7. Средний ритм: будет пульсирующий массаж каждые 0,25 секунды.
8. Быстрый ритм: будет пульсирующий массаж каждые 0,2 секунды.

Массажер рекомендуется использовать, при наличии следующих проблем:

1. У учащихся или взрослых людей с близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом.
2. После чрезмерного использования компьютера, чтения, длительного ношения очков, что привело к усталости глаз.
3. Для бухгалтеров, секретарей, учителей, водителей, который долгое время был за рулем, работникам высокоточного оборудования и так далее.
4. При пресбиопии.
5. Людям с морщинками вокруг глаз, синяками или мешками под глазами.

6. Людям с больными глазами, головной болью, лицевой невралгией тройничного нерва, неврастенией и бессонницей.

## **2. Схемы использования**

### **2.1 Профилактика близорукости, для более красивых глаз**

Используйте 3 раза в день по 3-5 минут за раз. Массаж эффективно улучшает микроциркуляцию в тканях глаза. Повышает регулируемую способность цилиарной мышцы, воздействует на ткани глаза. Повышается кислородная аэрация и улучшается состояние сосудов, что поможет улучшить зрение, предотвратить развитие близорукости, сделать глаза красивыми, яркими и успокоить сознание.

### **2.2 Стереть следы усталости**

Ношение в течение 3-5 минут за раз с закрытыми глазами, полностью расслабленными глазными яблоками и глазными мышцами. Снижает внутреннее давление глаз, поможет быстро устранить болезненность, пожелтение и сухость глаз, светобоязнь и так же помутнение зрения, вызванные чрезмерным напряжением глаз. Кроме того, магнитное поле имеет функцию успокоения. Если надевать массажер за 5-10 минут до сна, он помогает успокоить мысли, что поможет легко заснуть. Поможет устранить бессонницу, вызванную чрезмерным использованием мозга и неврастенией. и может сократить время до засыпания.

### **2.3 Уменьшить морщины, увеличить эластичность кожи**

Рекомендовано использование в течение 5-10 минут в день. Массажер поможет убрать не только мешки под глазами, но и темные круги, вызванные плохим сном или плохим уровнем кровообращения, усилит метаболизм в тканях глаза, разгладить морщинки вокруг глаз и сделать уголки глаз более светлыми и приподнятыми.


## **3. Использование**

1. Перед использованием массажера снимите контактные линзы, если вы их носите.
2. Убедитесь в чистоте массажных насадок. Очистите чистой влажной тканью, если требуется. Обратите внимание, что люди, у

которых болят или воспалены глаза, не должны использовать устройство.

3. Установите батареи в батарейный отсек. Для этого откройте батарейный отсек и, соблюдая полярность, установите батареи. Закройте батарейный отсек.
4. Включите питание, нажав на кнопку Вкл/Выкл. Массажер перейдет в автоматический режим. В данном режиме программа массажа постоянно меняется. Отключите питание, нажав на кнопку Вкл/Выкл.
5. Нажмите кнопку Режим, чтобы переключаться между различными режимами работы.
6. Нажмите кнопку Таймер, чтобы выбрать время работы массажера между 3 и 5 минутами.

#### **4. Неодимовые магниты**

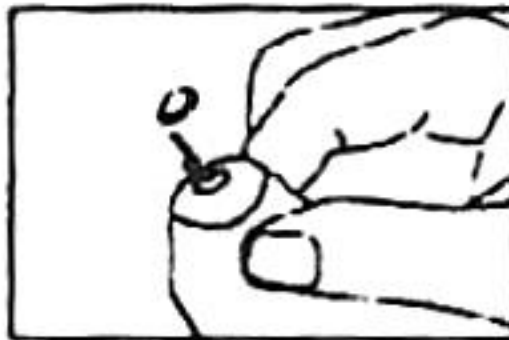

Если неодимовой магнит отсоединился от массажной насадки, установите его снова.

Перед установкой отключите питание.

#### **5. Меры предосторожности**


Массажер не следует использовать следующим категориям лиц:

- Лицам, с больными или воспаленными глазами.
- Людям, у которых болит голова.
- Людям с температурой или болеющим.

1. Выполняйте рекомендации доктора.

2. Не роняйте устройство на пол и не погружайте в воду.
3. Не используйте в ванной, других помещениях с повышенной влажностью или в местах с высокой температурой.
4. Отсутствие прямых солнечных лучей, предотвращает преждевременное пожелтение или преждевременное повреждения мягкого силикона.
5. При близорукости высокой степени применять только по назначению врача.
6. Дети до 8 лет должны использовать под руководством взрослых.
7. Не используйте на открытом воздухе.
8. Не используйте во время вождения.
9. Не используйте после операции на глазах или при болезнях глаз, до выздоровления.
10. Не рекомендуется использовать с контактными линзами.
11. Длительность использования детьми не должна превышать 20 минут.
12. Не снимайте магнитную насадку
13. Не нажимайте сильно кнопку массажа.
14. При установке батареи соблюдайте полярность.
15. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца

## 6. Внешний вид устройства

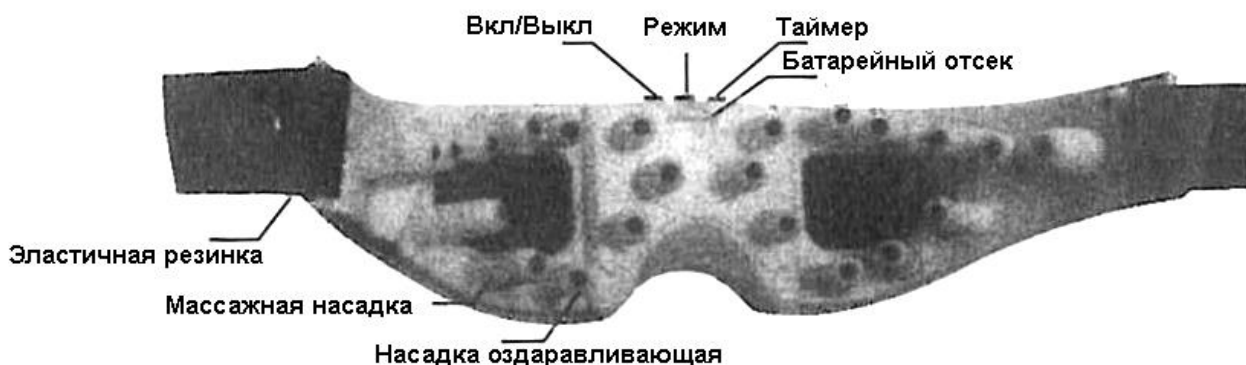

## 7. Уход и обслуживание

- Снимите массажер.
- Очистите насадки, корпус и кнопки массажера, чтобы они были максимально чистыми.
- Храните в прохладном, сухом и вентилируемом помещении.
- Берегите от детей.
- Извлеките батарею, если предполагается, что устройство не будет использоваться в течение длительного времени в будущем.
- Мы рекомендуем проводить глубокую чистку массажера каждый квартал. Машина имеет отверстие для передачи.

## 8. Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Нет питания	Батарея разряжена	Замените батарею
	Полярность не соблюдена	Переверните батарею
Не включается	Батарея не заряжена	Замените батарею
	Неправильное использование	Попробуйте снова
Слабая вибрация	Батарея разряжена	Замените батарею
Нет настройки времени	Неправильное использование	Попробуйте снова
Чувствуете боль в определенной зоне	Слишком долгое использование	Следите за временем использования
	Слишком сильное натяжение резинки	Ослабьте резинку
	Отсутствует магнит	Наденьте насадку
Цвет кнопок поменялся	Вы правили устройство после использования	Протрите влажной тканью
	Массажер покрыт косметикой	Протрите влажной тканью

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**